


Das weichlagernde Würfelkissen, ausgestattet mit austauschbaren Würfelementen, kann bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen die Dekubitusprophylaxe und -therapie unterstützen. Es ist speziell für die Unterstützung der Dekubitustherapie bei Personen im Rollstuhl entwickelt worden. Das Würfelkissen bietet eine ergonomische und druckentlastende Sitzfläche, die den Komfort erhöht und das Risiko der Entstehung eines Dekubitus reduziert. Zudem fördert es eine korrekte Sitzhaltung und kann Beschwerden, die durch längeres Sitzen entstehen, lindern.

Ein besonderer Vorteil ist die modulare Bauweise: Die einzelnen Schaumstoff-Würfel können herausgenommen oder durch andere ausgetauscht werden, um bestimmte Körperstellen gezielt zu entlasten – beispielsweise bei bereits gefährdeten Körperstellen. So lässt sich das Kissen individuell an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei einem Dekubitus um eine multifaktorielle Erkrankung handelt. Das Sitzkissen stellt lediglich einen Teil der Therapie dar. Es ist wichtig, auch andere relevante Pflegemaßnahmen und Möglichkeiten zur Druckentlastung zu berücksichtigen, um eine optimale Prävention und Behandlung zu gewährleisten.


Der Einsatz der Kissen sollte grundsätzlich von geschultem Fachpersonal beurteilt werden. In diesem Rahmen erfolgt auch die Anleitung zur passenden Anpassung, wie beispielsweise der Entnahme einzelner Würfel, sowie deren fachgerechte Durchführung. Die Kissen sind als vollwertige Sitzkissen für den Gebrauch im Rollstuhl oder in anderen Sitzgelegenheiten konzipiert.

Herausnahme von Würfelementen:


(alle Abbildungen sind beispielhaft)

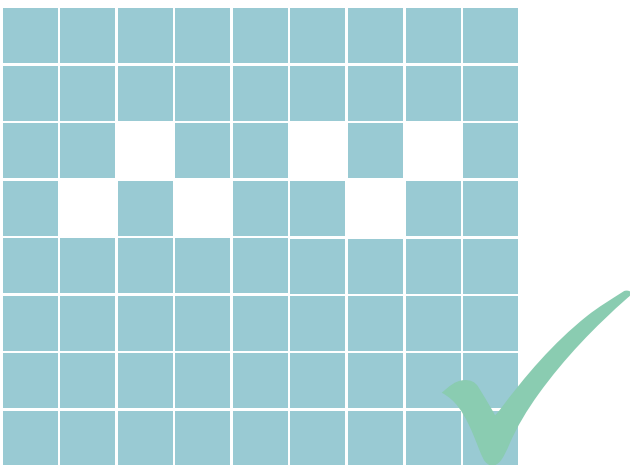

Durch gezielte Würfelentnahme wird eine Druckentlastung an bestimmten Körperstellen ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass eine Entnahme der Schaumstoff-Würfel nur schachbrettartig erfolgen darf.

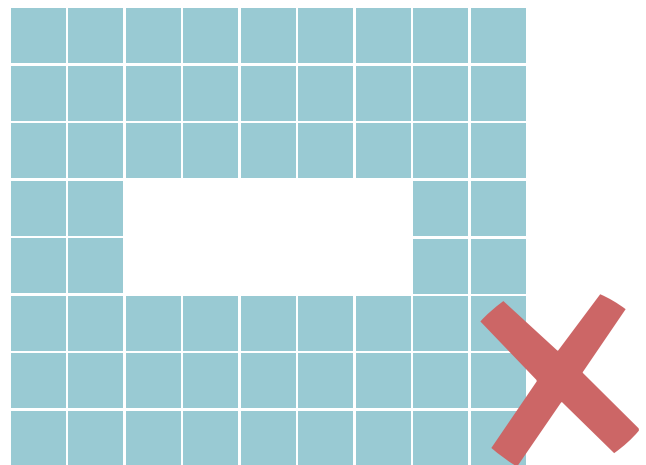

Bei der Entnahme von Würfeln dürfen keine großen Freiflächen gebildet werden, da sonst der Weichlagerungsaspekt erheblich gemindert wird.

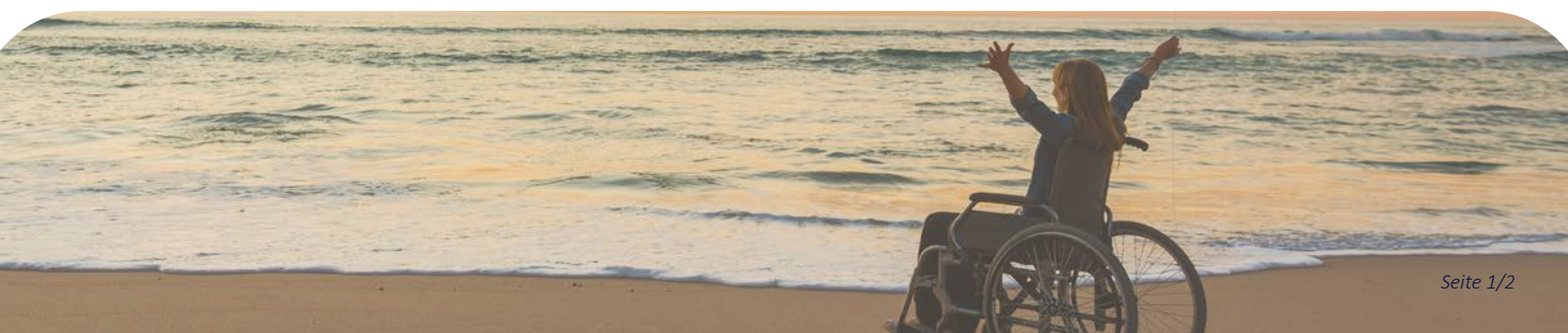


Austausch von Würfelementen:

(alle Abbildungen sind beispielhaft)


Für die folgenden Beispiele wurden zusätzlich Schaumstoff-Würfel aus viskoelastischem Schaum und Kaltschaum verwendet.

Linksseitige Entlastung

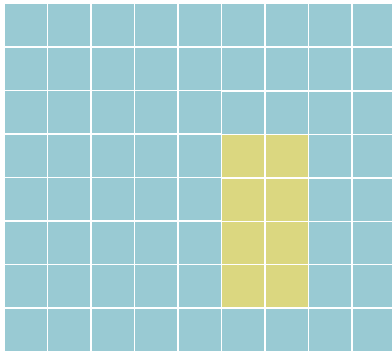


Vorne / Front side


Rechtsseitige Entlastung

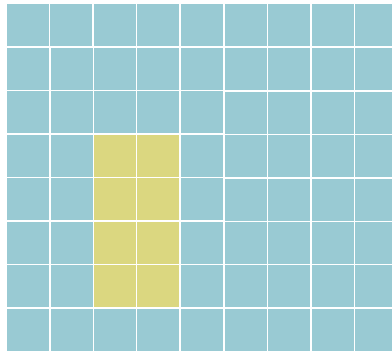


Vorne / Front side

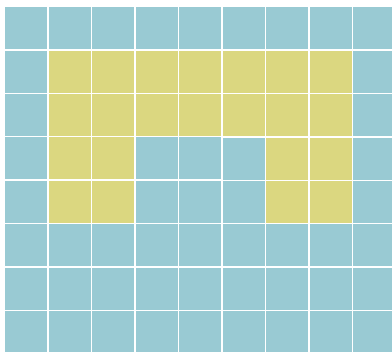

Vorne / Front side

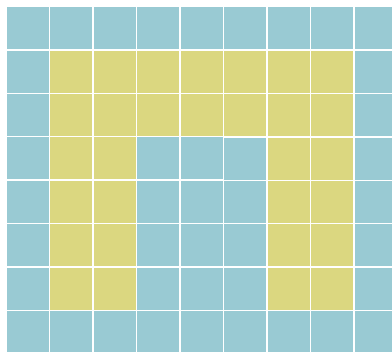


Vorne / Front side

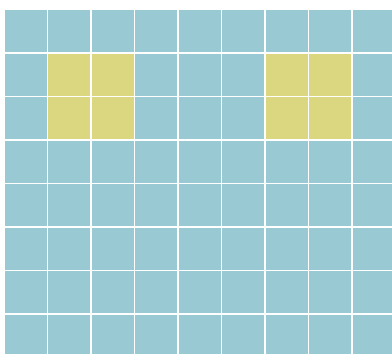

Vorne / Front side

Sitzbeinhöcker-Version

In diesem Beispiel liegt der Fokus auf der Entlastung und Weichlagerung der Sitzbeinhöcker. Die Positionierung der Schaumstoff-Würfel eignet sich besonders bei gefährdeten Sitzbeinhöckern, wie z.B. einer Kachexie (krankheitsbedingte Abmagerung) und ermöglicht eine weiche, komfortable Positionierung im Sakralbereich.

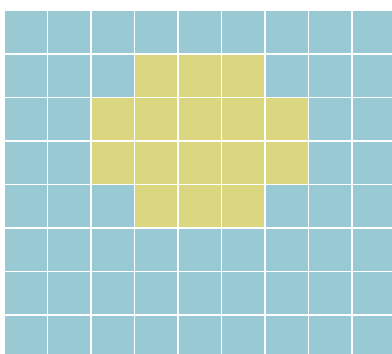


Vorne / Front side

Gesäßbereich-Version

Die Anordnung der Schaumstoff-Würfel sorgt für eine Druckentlastung im perianalen Bereich. Gefährdete Stellen im perianalen Bereich können weichlagernd positioniert werden.

 Kaltschaumstoff-Würfel

 Visco-Schaumstoff-Würfel

Arthrodesen-Version

Durch diese Anordnung der Schaumstoff-Würfel, kann ein Bein entlastet werden. Diese Einstellung entspricht den Vorteilen eines Arthrodesensitzkissens und kann zur Entlastung bei Knieproblemen beitragen. Die Platzierung der Würfel kann beliebig verlängert werden. Es können beide Beine entlastet werden.

Bodyshape-Version

Bei dieser Platzierung der viskoelastischen Schaumstoff-Würfel können die Vorteile eines Bodyshapes ermöglicht werden. Dieser unterstützt die Entlastung der Sitzbeinhöcker, fördert eine ergonomisch ideale Sitzposition und trägt gleichzeitig zur Druckentlastung im Bereich des Kreuzbeins bei.

