









Esterilizable térmicamente conforme a las normas del RKI\*

Hasta úlceras en estado 4 (EPUAP)

Muy alto riesgo



Cojín de celdas de aire de terapia de decúbito

para usuarios activos de sillas de ruedas!



- Extraíble
- Lavable hasta a 60° C

del microclima

Tejido de malla<sup>3</sup> para la regulación

Funda impermeable y transpirable

Reverso anti deslizante

Válvula de ajuste individual (operativa con una sola mano)

> Única tecnología GELTOUCH® con efecto refrescante

Núcleo de espuma hiperelástico de 3 capas: placa superior de espuma GELTOUCH®

HR-Foam



Tamaño en cm	Art No.
ancho x profundidad x altura	
45 x 44 x 8	XAIR4544
45 x 46 x 8	XAIR4546
46 x 51 x 8	XAIR4651
48 x 42 x 8	XAIR4842
48 x 44 x 8	XAIR4844
48 x 46 x 8	XAIR4846
50 x 42 x 8	XAIR5042
51 x 44 x 8	XAIR5144
51 x 46 x 8	XAIR5146
52 x 52 x 8	XAIR5252



XAIR® hybrid-Movie



Espuma Geltouch + espuma HR + poros abiertos



autoclave

Esterilizable en



1670 + 1671











MDR 2017/745











Material de funda Impermeable y a impermeable a su vez transpirable virus y bacterias según ASTM

óptimo

Funda bielástica para reducción de las fuerzas de

<sup>\*1</sup> El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.

<sup>\*2</sup> La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!















Asa para transporte fácil

Funda protectora suave con cierre de velcro



Levante la solapa protectora.



Abra la válvula tirando hacia afuera el cierre azul y espere 30 segundos hasta que las celdas de aire se hayan inflado automáticamente ellas solas. (El cierre azul no puede separarse por completo.)



Cierre la válvula presionando hacia adentro.



Coloque el cojín en la silla de ruedas o asiento. (El tubo debe estar orientado hacia el frontal y las flechas apuntando hacia arriba.) Siéntese en el cojín.



Abra la válvula cuiadadosamente hasta conseguir un confort ideal en sedestación.




Cerrar la válvula y la solapa protectora.





Para usuarios activos de sillas de ruedas!

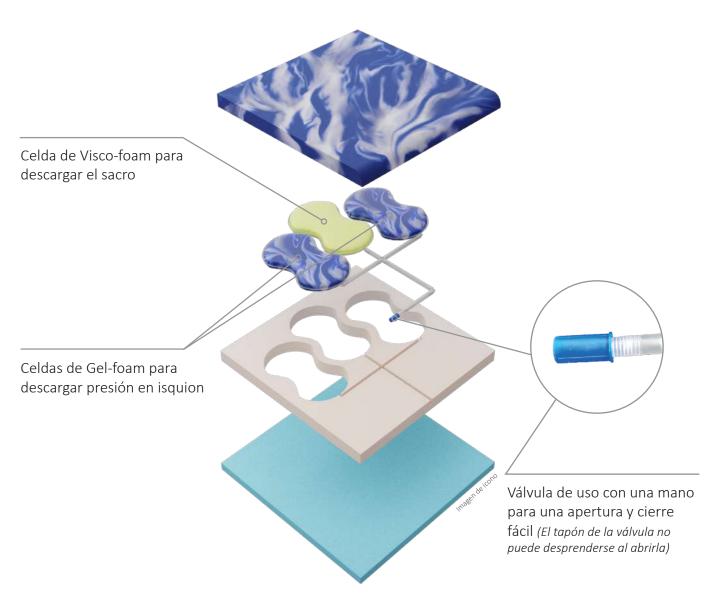



Asiento con 3-cámaras que dan una óptima descarga de presión



Se adapta fácil y rápidamente a las condiciones de presión externas



Ajustable individualmente para un confort excelente



No se necesitan inflador ni herramientas



Sin riesgo de error dada la tecnología de autoinflado FOAM-IN-CELL-TECHNOLOGY



Muy ligero – 70% más ligero que los cojines convencionales de aire